

ALCON™ SALINE SOLUTION
Unit Dose Container
CE-labeling
Package Insert

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door en bewaar hem voor latere raadpleging.

BESCHRIJVING :

Alcon® Saline Solution is een steriele, ongeconserveerde, isotone, waterige oplossing die natriumchloride (0,9%) bevat.

WERKING :

Het afspoelen met **Alcon® Saline Solution** verwijdt kleine stofdeeltjes, micro-organismen en reinigings- en desinfectie-oplossingen van uw contactlenzen wanneer het gebruikt wordt met een thermische desinfectie-unit. Het houdt de lenzen vochtig (gehydrateerd) tijdens desinfectie d.m.v. hitte en tijdens het bewaren.

GEBRUIK (indicaties) :

Voor het afspoelen van alle contactlenzen. **Alcon® Saline Solution** kan ook worden gebruikt, samen met een verhittingsapparaat, voor de desinfectie d.m.v. hitte van zachte (hydrofiele) contactlenzen of in elke omstandigheid waarin gebruik van een steriele zoutoplossing aangewezen is.

CONTRA-INDICATIES (redenen om het product niet te gebruiken) :

Geen redenen bekend.

ALGEMENE AANWIJZINGEN :

- Was en spoel uw handen altijd af alvorens u uw contactlenzen aanraakt.
- Behandel steeds dezelfde lens eerst (de rechter of de linker) om verwisseling te voorkomen.
- Wanneer u een nieuwe lenshouder gebruikt, dient u deze voor gebruik uit te spoelen met **Alcon® Saline Solution** om eventuele kleine stofdeeltjes te verwijderen.
- Na gebruik dient u de lenshouder altijd leeg te gieten, uit te spoelen met **Alcon® Saline Solution** en aan de lucht te laten drogen. Alcon raadt u aan uw lenshouder regelmatig te vervangen.

GEBRUIKSAANWIJZING :

Gebruik **Alcon® Saline Solution** in elke omstandigheid waarin gebruik van een steriele zoutoplossing bij de verzorging van uw contactlenzen is aangewezen.

- Draai de top van de ampul.
- Gooi na gebruik de ampul weg.

WAARSCHUWINGEN :

Het is van groot belang dat u de aanwijzingen van uw oogzorgprofessional en alle op de bijsluiter en verpakking vermelde instructies opvolgt voor een juist gebruik en een optimale verzorging van uw lenzen en uw lensverzorgingsproducten. Als u last krijgt van aanhoudend ongemak in de ogen, overmatig tranen, veranderingen in uw gezichtsvermogen of rode ogen, doe de lenzen dan ONMIDDELIJK uit en raadpleeg uw oogzorgprofessional. Het probleem zou namelijk ernstiger kunnen worden.

ALCON™ SALINE SOLUTION
Unit Dose Container
CE-labeling
Package Insert

VOORZORGEN :

- Gebruik altijd verse **Alcon® Saline Solution**. Gebruik de oplossing in uw lenshouder nooit opnieuw.
- Gooi de overblijvende vloeistof na gebruik weg. Bewaar geen vloeistof in een geopende ampul.
- Bewaren bij kamertemperatuur.
- Gebruiken vóór de op het product vermelde vervaldatum. 
- Buiten het bereik van kinderen houden.

VERPAKKING :

Alcon® Saline Solution, gesteriliseerd door filtratie, is verkrijgbaar in dozen met ampullen van 15 ml.

STERILE	A
---------	---

GEDISTRIBUEERD DOOR :

ALCON NV
Medialaan 36
B-1800 Vilvoorde, België
Alcon Nederland BV
Claudius Prinsenlaan 142
4848 CP Breda, The Netherlands



Alcon Laboratories Inc.
6201 South Freeway
Fort Worth, TX, USA 76134-2099



Alcon Laboratories (U.K.) Ltd.
Frimley Business Park
Frimley, Camberley
Surrey, GU16 7SR,
Verenigd Koninkrijk

CE₀₁₂₃

© xxxx Novartis