

Conceive Plus® Tube 75 ml / 30 ml

BELANGRIJKSTE VOORDELEN:

Klinisch getest: sperma vriendelijk

Ondersteunt de levensvatbaarheid van spermacellen

Zorgt voor aanvullend vocht

Gepatenteerde formule

BESCHRIJVING:

Conceive Plus® is het vruchtbaarheidsmiddel voor alle stellen die zwanger proberen te worden, dus voor koppels die net zijn begonnen en stellen die al een poosje bezig zijn.

In tegenstelling tot conventionele glijmiddel het is geformuleerd om isotoon te zijn en een pH range te hebben die geschikt is voor de overleving en migratie van sperma.

Conceive Plus is het vruchtbaarheidsmiddel dat zowel Calcium- als Magnesium ionen bevat.

Deze ionen zijn van essentieel belang voor de levensvatbaarheid van cellen in ons lichaam en tijdens het bevruchtingsproces.

Klinische studies tonen aan dat 99% van het sperma levensvatbaar is 2 uur na blootstelling aan Conceive Plus.*

Het gebruik van Conceive Plus kan helpen om de kansen om natuurlijk zwanger te worden vergroten.

Wij raden gebruik van Conceive Plus aan samen met de losverpakte applicators.

AANWIJZINGEN:

Conceive Plus is een glijmiddel toe te passen op de penis en / of de vagina, is bedoeld om te hydrateren en in te smeren, het gemak en het comfort van intieme seksuele activiteit te verbeteren. Het werkt als aanvulling op de natuurlijke smering van het lichaam. Conceive Plus is compatibel met sperma, eicellen en embryo's en kan worden gebruikt door paren die proberen zwanger te raken en kan rechtstreeks worden aangebracht op de genitaliën. Conceive Plus is combineerbaar met natuurlijk rubberlatex en van polyurethaan condooms. Kan gebruikt worden bij vruchtbaarheidsinterventies om het inbrengen van diagnostische en therapeutische hulpmiddelen in de vaginale holte te faciliteren.

GEBRUIKSAANWIJZING:

Verwijder de veiligheidssluiting onder de dop voor het eerste gebruik. Smeer de vagina of penis

in en herhaal zo dit vaak als nodig is. Kan samen worden gebruikt met Conceive Plus Losverpakte Applicators voor de intra-vaginale applicatie.

INGREDIENTEN:

Water, Hypromellose, natriumfosfaat, natriumdiwaterstoosfaat, kaliumchloride, natriumchloride, magnesiumchloride, calciumchloride, glycerol, Methylparaben.

LET OP:

geen anticonceptiemiddel, Conceive Plus dood geen zaadcellen en intervenueert niet met de sperma-functie. Niet gebruiken als het zegel is verbroken of ontbreekt. Indien irritatie optreedt, stop direct met het gebruik en raadpleeg uw arts als de irritatie aanhoudt. Buiten het bereik van kinderen houden. Conceive Plus is erg glad en dient na het morsen onmiddellijk opgeruimd te worden. Bewaren tussen 2 ° C - 30 ° C in deze doos.

Lees altijd het etiket, gebruik het product alleen zoals is aangegeven.

* Een gepubliceerde studie heeft aangetoond dat het gebruik veilig is voor sperma, meer informatie op conceiveplus.com