

OPTI-FREE® PureMoist® Solution Multi-Fonctions de Décontamination

PACKAGE INSERT

Lire attentivement cette notice et la conserver pour la réutiliser.

OPTI-FREE® PureMoist® Solution Multi-Fonctions de Décontamination

Des lentilles hydratées pendant 16 heures pour un confort de port de la pose jusqu'au retrait

Nettoie, rénove, rince, décontamine, conserve

Élimine les dépôts de lipides et de protéines quotidiennement

Prévient le dépôt de lipides

Pour toutes les lentilles de contact souples et en silicone hydrogel

DESCRIPTION:

OPTI-FREE® PureMoist® Solution Multi-Fonctions de Décontamination est une solution aqueuse, stérile, tamponnée contenant du citrate de sodium, du chlorure de sodium, de l'acide borique, de l'aminométhylpropanol, du sorbitol, de l'édétate disodique, deux agents mouillants (TETRONIC® 1304† et HydraGlyde® Matrice Hydratante [EOBO-41™- polyoxyéthylène-polyoxybutylène]) et les conservateurs POLYQUAD® (polyquaternium-1) 0,001% et ALDOX® (myristamidopropyl diméthylamine) 0,0006%. HydraGlyde® Matrice Hydratante est un copolymère séquencé multi-fonctions, principalement conçu pour hydrater et lubrifier les lentilles en silicone hydrogel.

†TETRONIC® est une marque déposée de BASF.

ACTIONS:

Lorsqu'il est utilisé selon la notice, **OPTI-FREE® PureMoist® Solution Multi-Fonctions de Décontamination** :

- Nettoie en éliminant quotidiennement les dépôts lipidiques et protéiques de la surface de vos lentilles lors de la décontamination et de la conservation.
- Est efficace contre les micro-organismes nuisibles (bactéries, champignons et *Acanthamoeba*), grâce aux deux décontaminants biocompatibles, POLYQUAD® et ALDOX®.
- Rince et rénove vos lentilles de contact souples (hydrophiles) et vos lentilles en silicone hydrogel.
- Est formulé pour décontaminer et conserver les lentilles jusqu'à 30 jours après la décontamination.

Aucun nettoyant enzymatique distinct n'est nécessaire si vous utilisez quotidiennement **OPTI-FREE® PureMoist® Solution Multi-Fonctions de Décontamination**.

Ne pas remplacer **OPTI-FREE® PureMoist® Solution Multi-Fonctions de Décontamination** par une solution saline pour conserver vos lentilles de contact. Une solution saline ne décontamine pas les lentilles.

INDICATIONS (Utilisations) :

A utiliser quotidiennement pour le nettoyage, la rénovation, le rinçage, l'élimination des dépôts lipidiques et protéiques, la prévention des dépôts lipidiques, la décontamination chimique (non thermique) et la conservation de toutes les lentilles de contact souples (hydrophiles) et des lentilles en silicone hydrogel, selon les recommandations de votre spécialiste.

Amélioration de la mouillabilité, du pouvoir lubrifiant, de l'hydratation et du nettoyage pour les porteurs de lentilles

OPTI-FREE® PureMoist® Solution Multi-Fonctions de Décontamination :

- Offre 16 heures d'hydratation prolongée pour un confort de port qui dure toute la journée. HydraGlyde® Matrice Hydratante agit indépendamment du film lacrymal pour maintenir vos lentilles hydratées et pour un confort de port de la pose jusqu'au retrait de vos lentilles.
- Maintient une couche permanente d'hydratation qui permet à votre paupière de glisser sur la surface de la lentille sans irritation.
- Maintient la lentille hydratée tout au long de la journée.
- Se lie aux zones sèches de la lentille pour empêcher le dépôt de lipides et de protéines pour des lentilles qui restent propres et confortables.
- Elimine les dépôts de lipides et de protéines pour des lentilles qui restent propres et confortables.

CONTRE-INDICATIONS (Dans quels cas ne pas l'utiliser) :

Ne pas utiliser ce produit si vous êtes allergique à l'un de ses composants.

INSTRUCTIONS D'ORDRE GENERAL :

- Retirez complètement la bague de sécurité présente autour du bouchon avant utilisation.
- Lavez-vous et séchez-vous systématiquement les mains avant de manipuler vos lentilles.
- Nettoyez, rénovez, rincez et décontaminez vos lentilles chaque fois que vous les retirez.
- Commencez toujours la manipulation par la même lentille, droite ou gauche, pour éviter de les confondre.
- Après utilisation, videz toujours le contenu de l'étui de trempage, rincez-le avec de l'**OPTI-FREE® PureMoist® Solution Multi-Fonctions de Décontamination** et laissez-le sécher à l'air.

POUR UN RESULTAT OPTIMAL, SUIVEZ CES INSTRUCTIONS POUR LE NETTOYAGE, LA RENOVATION, LA DECONTAMINATION ET L'ELIMINATION DES PROTEINES :

- **Mouillez** chaque face de la lentille avec **OPTI-FREE® PureMoist® Solution Multi-Fonctions de Décontamination**. Massez la lentille pendant 20 secondes.
- Rincez chaque face de la lentille pendant 10 secondes avec un jet constant d'**OPTI-FREE® PureMoist® Solution Multi-Fonctions de Décontamination**.

- Remplissez votre étui de trempage ALCON® avec une nouvelle quantité d'**OPTI-FREE® PureMoist® Solution Multi-Fonctions de Décontamination**. Laissez les lentilles dans l'étui de trempage fermé toute la nuit ou au moins pendant 6 heures. Après rinçage, les lentilles sont prêtes à être portées.

Si des débris restent sur vos lentilles de contact, rincez-les avec **OPTI-FREE® PureMoist® Solution Multi-Fonctions de Décontamination** avant la pose. Vous pouvez laisser les lentilles dans leur étui de trempage fermé et contenant **OPTI-FREE® PureMoist® Solution Multi-Fonctions de Décontamination** jusqu'à 30 jours. Au-delà, vos lentilles doivent être à nouveau nettoyées et décontaminées avec **OPTI-FREE® PureMoist® Solution Multi-Fonctions de Décontamination** avant d'être portées.

Suivez toujours les instructions de votre spécialiste. Ne changez pas les instructions d'entretien de vos lentilles ou votre solution d'entretien sans consulter votre spécialiste.

MISES EN GARDE:

Pour bien utiliser et prendre soin de vos lentilles et produits d'entretien, y compris l'étui de trempage, il est essentiel de suivre les instructions de votre spécialiste et toutes celles de la notice. Si vous ressentez une gêne persistante dans l'œil, un larmoiement excessif, des modifications de la vision, ou une rougeur de l'œil, retirez IMMEDIATEMENT vos lentilles et consultez votre ophtalmologiste, car le problème pourrait s'aggraver.

PRECAUTIONS:

- Utilisez toujours une nouvelle quantité d'**OPTI-FREE® PureMoist® Solution Multi-Fonctions de Décontamination**. Ne jamais réutiliser la solution de votre étui de trempage.
- Pour éviter toute contamination, ne jamais rien toucher avec l'embout du flacon.
- Remplacez le bouchon après utilisation.
- A conserver à température ambiante.
- Gardez le flacon bien fermé lorsque vous ne l'utilisez pas.
- A utiliser avant la date de péremption indiquée sur le produit. 
- Jetez toute solution restante 6 mois après la première ouverture.
- Ne pas laisser à la portée des enfants.
- Ne pas utiliser pour une décontamination à chaud (thermique).

PRESENTATION:

OPTI-FREE® PureMoist® Solution Multi-Fonctions de Décontamination, stérilisé par filtration, est disponible en flacons plastiques de 60 ml, 90 ml et 300 ml.



Etui de trempage ALCON® **(OPTIONNEL)**

DISTRIBUTEUR POUR LA FRANCE :

Laboratoires ALCON

4, rue Henri Sainte Claire Deville

OPTI-FREE Puremoist® MPDS
Insert, Carton, Bottle

F-92563 RUEIL MALMAISON Cedex

DISTRIBUTEUR POUR LA BELGIQUE ET LE LUXEMBOURG :

ALCON NV
Medialaan 36
B-1800 Vilvoorde



Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway
Fort Worth, Texas, USA 76134-2099



Alcon Laboratories (U.K.) Ltd.
Frimley Business Park
Frimley, Camberley
Surrey, GU16 7SR,
Royaume-Uni

Brevets européens Nos. 0639070, 0669803 et 0948357



© 2011 Novartis