

L'autotest Cannabis est un test immunochromatographique rapide qui permet de détecter la substance active (THC) et ses métabolites dans les urines.

CANNABIS

Origine : Mélange de feuilles et d'extrémités florales de la plante Cannabis

Propriétés : Action psycho-active

Effets : Exaltation, extase, sommeil, troubles psychiques, perte de facultés intellectuelles

Durée de détection dans les urines :

3 à 10 jours après consommation.

PRINCIPE

Les tests de recherche de toxiques dans les urines font appel à des techniques immunologiques simples. La rapidité et la sensibilité des tests immunologiques en ont fait une méthode de dépistage dans l'urine largement utilisée.

La sensibilité de ce test permet de détecter la présence du THC et de ses métabolites, témoins urinaires de la consommation de Cannabis.

IMPORTANT

L'autotest Cannabis fournit seulement un résultat analytique préliminaire. Une méthode chimique alternative doit être utilisée pour confirmer le résultat.

MATÉRIEL FOURNI

- 1 pochette contenant : 1 cassette, 1 pipette • 1 notice d'utilisation
- 1 coupelle de recueil

PRÉCAUTIONS

Lire toutes les informations de cette notice avant d'effectuer le test.


- Ne pas utiliser après la date d'expiration indiquée sur la pochette en aluminium.
- Conserver dans un endroit sec à des températures comprises entre 2 et 30°C. Ne pas congeler.
- Ne pas utiliser le test si la pochette est déchirée ou endommagée.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Usage externe uniquement.
- N'ouvrir la pochette du test que lorsque vous êtes prêt à l'utiliser.
- Les tests usagés doivent être mis au rebut dans le respect des réglementations en vigueur.

MODE D'EMPLOI



EMPLACEMENT POUR
DÉPOSER L'URINE

FENÊTRE
DE RÉSULTAT

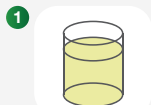

Uriner dans le récipient fourni. L'urine peut être collectée à n'importe quel moment de la journée.

Attention : une urine trouble peut fausser le test.



Prélever un échantillon d'urine grâce à la pipette.

Déposer 3 gouttes sur le test. Après ouverture, le test doit être utilisé dans l'heure.

Lire le résultat au bout de 5 minutes. Ne pas interpréter au-delà de 10 minutes.

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS



POSITIF

Une bande colorée apparaît dans la zone de contrôle (C). Aucune bande n'apparaît dans la zone de test (T). Cela signifie que le THC ou l'un de ses métabolites sont présents à une concentration égale ou supérieure aux seuils de détection du test.



NÉGATIF

Deux bandes colorées apparaissent, une dans la zone de Contrôle (C) et une dans la zone de Test (T). Le fait que l'une des bandes soit plus claire que l'autre n'a pas d'incidence sur les résultats. Cela signifie que le THC ou que l'un de ses métabolites absents ou présents à une concentration inférieure aux seuils de détection du test. Les seuils de détection du test sont précisés ci-dessous.



INVALIDE

Le résultat n'est pas valable lorsqu'aucune bande colorée n'apparaît dans la zone de contrôle (C), même si une bande apparaît dans la zone de test (T). Répétez la procédure avec un nouveau test. Vous référer aux instructions d'utilisation.

SEUIL DE DÉTECTION DANS L'URINE

Substances	Concentration ng/ml
11-nor- D9-THC-9 COOH (THC)	50
Cannabinol	20 000
11-nor- D8-THC-9 COOH	30
D8-THC	15 000
D9-THC	15 000

Cannabis-Selbsttest

Nachweis von THC und entsprechenden Rückständen im Urin

Der Cannabis-Selbsttest ist ein immunchromatographischer Schnelltest für den Nachweis des Wirkstoffs THC und seiner Metaboliten im Urin.

CANNABIS

Ursprung : Mischung aus Blättern und Blüten der Cannabis-Pflanze

Eigenschaften : Psychoaktive Substanz

Wirkung : Hochstimmung (Euphorie), Extase, Schlaf, psychische Störungen, Verlust geistiger Fähigkeiten

Nachweisbarkeitsdauer im Urin :

3 bis 10 Tage nach dem Konsum.

TESTPRINZIP

Tests für den Nachweis toxischer Substanzen im Urin basieren auf einfachen immunologischen Techniken. Aufgrund ihrer Schnelligkeit und Empfindlichkeit werden immunologische Tests für den Nachweis im Urin verbreitet eingesetzt.

Die Empfindlichkeit dieser Tests ermöglicht den Nachweis von THC und seiner Metaboliten, die den Konsum von Cannabis im Urin anzeigen.

WICHTIGER HINWEIS

Der Cannabis-Selbsttest liefert lediglich ein vorläufiges Analyseergebnis. Zur Bestätigung des Ergebnisses muss eine alternative chemische Methode verwendet werden.

BESTANDTEILE DES TEST-KITS

- Beutel mit: 1 Kassette, 1 Pipette • 1 Gebrauchsanweisung
- Urinprobenbecher

VORSICHTSMASSNAHMEN

Bitte lesen Sie die gesamte Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, bevor Sie den Test durchführen.


- Den Test nach Ablauf des Verfalldatums auf dem Aluminiumbeutel nicht mehr verwenden.
- Den Test an einem trockenen Ort bei Temperaturen zwischen 2 und 30°C aufbewahren. Nicht einfrieren.
- Den Test nicht verwenden, wenn der Beutel aufgerissen oder beschädigt ist.
- Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Nur zur äußerlichen Anwendung.
- Den Beutel mit dem Test erst kurz vor der Verwendung öffnen.
- Tests müssen nach dem Gebrauch unter Einhaltung der geltenden Vorschriften entsorgt werden.

GEBRAUCHSANWEISUNG



URINPROBE
HIER AUFTRAGEN

ERGEBNIS-FENSTER

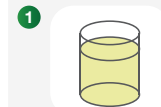


In den mitgelieferten Behälter urinieren. Der Urin kann zu jeder beliebigen Tageszeit gesammelt werden.
Vorsicht: Trüber Urin kann die Testergebnisse verfälschen.



Mithilfe der Pipette eine Urinprobe entnehmen.



3 Tropfen auf den Test geben. Nach dem Öffnen muss der Test binnen einer Stunde verwendet werden.

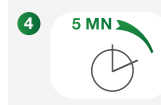

Nach 5 Minuten das Ergebnis ablesen. Nach 10 Minuten ist das Ergebnis nicht mehr auswertbar.

C
T

C
T

C
T

C
T

IFU_860760_BE_V02202508R01
REF : 860760
Date de dernière révision/ Datum der letzten Revision/
Datum van laatste herziening: 08/2025